

Cuidados que debe tener el Paciente con el Oxígeno Líquido Medicinal

AGA

Member of the Linde Gas Group



No FUMAR



No tenga el reservorio cerca del FUEGO.



No tenga el reservorio al SOL directo.



No mezcle grasa con el Oxígeno, provoca fuego



No deje el reservorio en superficies irregulares y fije la reserva para evitar una posible caída.



No permita que los NIÑOS jueguen cerca del reservorio .



No tenga el reservorio en lugares peligrosos.



No utilice martillos, ni pinzas para abrir las unidades.



Tenga precaución con su línea de oxígeno de 15 mtrs.



Mantenga la unidad portable en un área segura para evitar caídas.



Si el reservorio presenta alguna FUGA llame de inmediato a AGA.



No mueva el humidificador de agua de manera brusca.



No golpee el reservorio con alguna herramienta.



La dosificación (Its/min) debe ser bajo orden médica.



Mantenga el humidificador con agua y limpio.



Solicite a AGA su oxígeno cuando el indicador se aproxime al estado VACIO.

Centro de Atención al Cliente
0800 9999 AGA (242) / 4229 1200

AGA Linde Healthcare
Helping you care more effectively